



O V E S C O


innovation in scope



BougieCap.....

Para a dilatação de estenoses no trato gastrointestinal superior

- Controle visual direto para uma dilatação precisa
- Dilatação simples e eficaz com menos trocas de instrumentos
- Até 99% menos desperdício em comparação com os métodos de dilatação convencionais¹

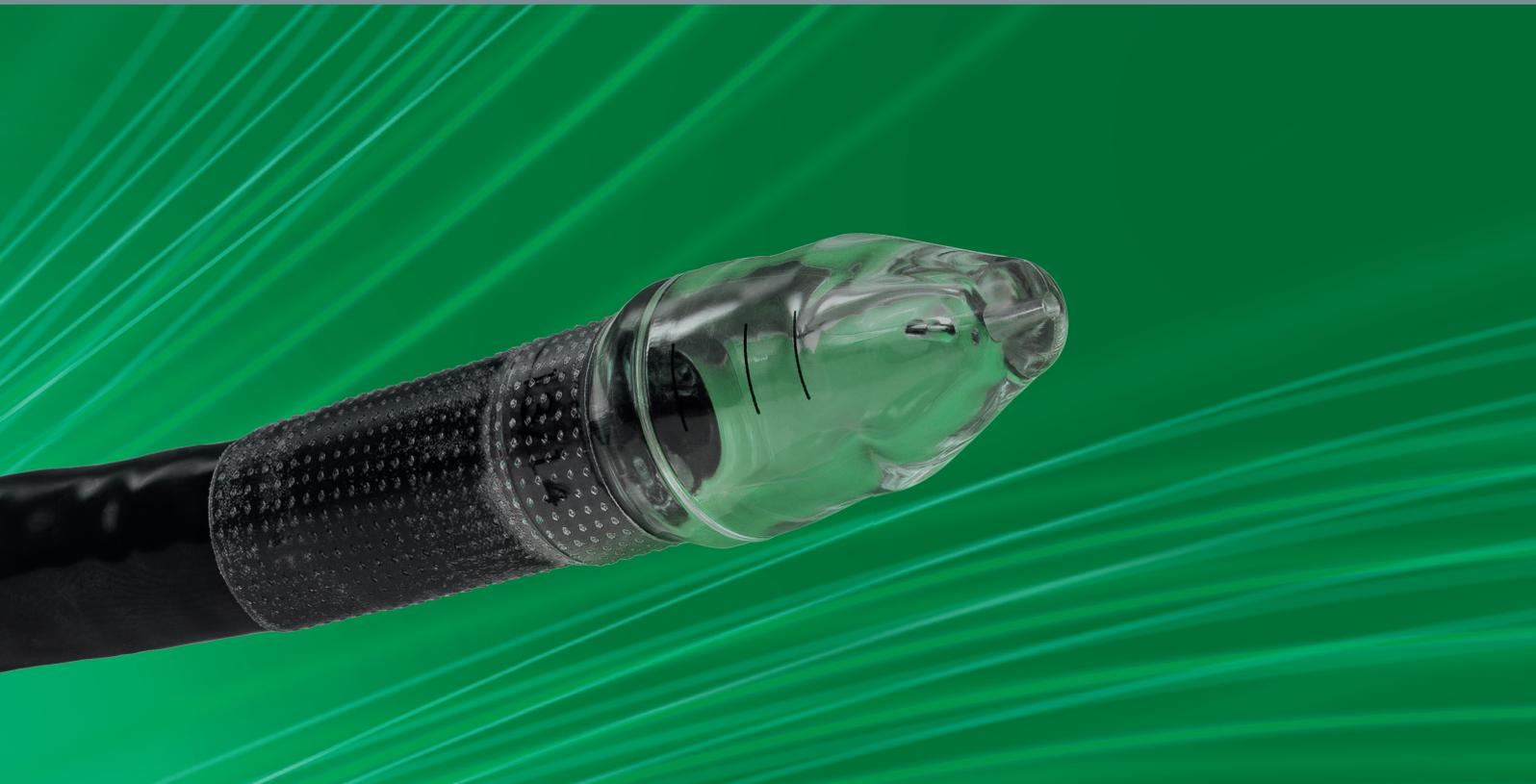



**BOUGIE
CAP**



O V E S C O



BougieCap

Para uma dilatação controlada e eficaz de estenoses e restrições no trato gastrointestinal superior.

O BougieCap permite o controle visual direto durante o procedimento de dilatação. Graças ao seu design cônico, as estenoses e restrições podem ser dilatadas com muito cuidado e precisão em aumentos milimétricos, evitando assim o alongamento excessivo.

A tampa transparente acoplada permite a avaliação direta da dilatação. Além disso, o tempo do procedimento é reduzido devido ao menor número de trocas de instrumentos.


Os dois orifícios na extremidade distal da tampa permitem a insuflação, a sucção e a lavagem. Um orifício central na ponta permite que o BougieCap seja usado com um fio-guia (máx. 1mm/0,038 pol.).

Versões Disponíveis


| BougieCap | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº de referência | 400.31.02 | 400.31.03 | 400.32.01 | 400.32.02 | 400.32.03 | 400.32.04 |
| Diâmetro do endoscópio [mm] | 5,4–5,9 | | | 9,4–9,9 | | |

Aplicação


Estenose esofágica

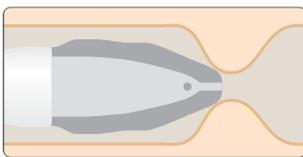

Guie o endoscópio com o BougieCap acoplado até um pouco antes da estenose.

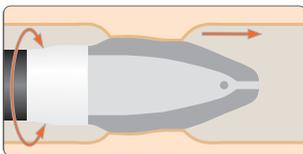

Empurre cuidadosamente o BougieCap até o primeiro platô de dilatação usando rotações suaves. Em seguida, se necessário, continue empurrando até atingir o segundo platô.

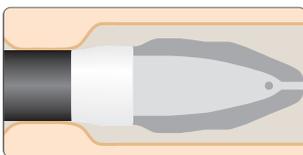

Passagem bem-sucedida.



1 Yzet C, Figueiredo M, Michoud C, Lafeuille P, Rivory J, Pioche M. **Ecological impact of endoscopic dilatation using the bougie cap device: a low-tech innovation to reduce waste by 99 %.** Endoscopy. 2022; 10.1055/a-1838-3860.

2 Prof. Meining, Hospital universitario de Würzburg, Alemanha.

Distribuidor Autorizado



Lynx Medical

Narciso Sturlini, 302 – Cidade:

Osasco, São Paulo – Brazil

Phone: +55 (11) 3682-4618 or

3683-8851

E-Mail: vendas@lynxmedical.com.br

Ovesco Endoscopy USA Inc.

15300 Weston Parkway

Suite 101

Cary, NC 27513,

USA

Phone +1 919 651 9449

Fax +1 408 608 2077

customerservice@ovesco-usa.com

Escaneie aqui para obter mais informações sobre o produto



A **Ovesco Endoscopy AG** é uma empresa de dispositivos médicos especializada nas áreas de endoscopia flexível, cirurgia endoluminal e diagnóstico telemétrico. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa produtos inovadores para a detecção e o tratamento de doenças gastrointestinais. Os produtos da Ovesco são sinônimos de eficácia e aplicação eficiente.

www.ovesco.com



Portuguese version 2 | 2025-03-17